



Achtung. Gebrauchsanweisung beachten!



- Mobile Haltegriffe unterstützen die natürliche Bewegung, z.B. als Aufstehhilfe. Sie sind nicht konstruiert um das gesamte Körpergewicht zu tragen. **Bitte beachten Sie das in der Gebrauchsanweisung und auf den Haltegriffen angegebene maximale Nutzergewicht!**
- Vor jeder Benutzung des Mobilten Haltegriffes muss die Vakuum Sicherheitsanzeige überprüft werden und wenn nötig der Griff neu befestigt werden (siehe Gebrauchsanweisung).
- Um Beschädigungen oder Verletzungen auf Grund von Bedienungsfehlern zu vermeiden und um eine optimale Nutzung sicherstellen zu können, **lesen Sie vor Benutzung die beiliegenden Gebrauchsanweisung und Hinweise sorgfältig durch.** Bewahren Sie alle Informationen gut auf und geben Sie diese auch an andere Benutzer weiter.



Drücken Sie den Haltegriff fest an die Fliese.



Drücken Sie nun den Kipphebel fest gegen die Wand. So stellen Sie sicher, dass die Saugscheibe des Haltegriffs plan aufliegt und die Restluft komplett entweichen kann.



Legen Sie den Kipphebel um.


Rückseite beachten!
Bitte die beiliegende Gebrauchsanweisung gründlich durchlesen!




Wichtige Information zur Vakuum Sicherheitsanzeige! Funktionsweise der Sicherheitswippe: Das Vakuum wird permanent geprüft.



Die volle Sicherheit für das angegebene maximale Benutzergewicht.
Bild 1+2

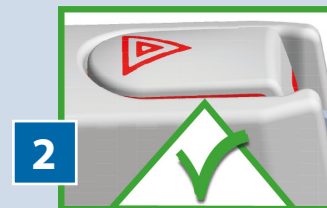

Achtung: Der Griff muss sofort neu befestigt werden!
Das Vakuum des Haltegriffs ist reduziert. Der Griff ist nicht mehr für das maximale Benutzergewicht zulässig.
(Nur zur Information: eine reduzierte Haltekraft ist weiterhin vorhanden.)
Bild 3+4

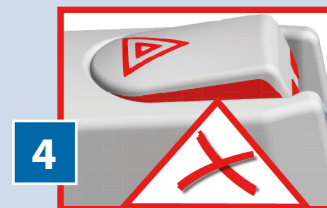

Wenn ein Haltegriff für längere Zeit an einer porendichten Oberfläche befestigt ist, wird die Saugscheibe des Saugkopfes überdehnt und leicht gewölbt (**Bild 5**). Daher empfehlen wir, den Griff etwa alle 14 Tage von der Oberfläche zu lösen und über Nacht mit entspannten Kipphebeln auf einer ebenen Fläche liegen zu lassen. Beim erneuten Befestigen ist es wichtig, den Kipphebel vor dem Umlegen fest an die Oberfläche zu drücken.

Beachten Sie die umseitigen Anweisungen!

Sollte die Sicherheitswippe an derselben Befestigungsstelle schneller als gewohnt herausfahren, empfehlen wir eine Grundreinigung mit unserem Reiniger (Best. Nr. 1400680). Den Reiniger erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler. Sind die Saugscheiben extrem überdehnt oder zerkratzt sollten diese ausgewechselt werden. Wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Steht die Sicherheitswippe nach dem Umlegen des Kipphebels über und lässt sich auch nach dem Eindrücken der Wippe nicht versenken, **muss der Vorgang zum Befestigen des Griffs von neuem begonnen werden.**

Wenn die Sicherheitswippe wie auf Bild 3+4 ausgefahren ist, darf der Griff nicht weiter verwendet werden. Es besteht Unfallgefahr!

