

QuattroPlus Diagonalgelenk-Adapter



Gebrauchsanleitung

ROTH **MOBELI®** Diagonalgelenk-Adapter

REF 1400557

als Zubehör für QuattroPlus Haltegriffe

(Bestell. Nr. 14002 41S, 14002 42S, 14002 43S, 14002 44S.)

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemein	2
1.1 Allgemeine Informationen	2
1.2 Erklärungen/Symbole in der Anleitung und auf dem Griff	2
1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung und Einsatzbereich	2
1.4 Nutzungsdauer	2
1.5 Wiedereinsatz	2
2. Sicherheitsinformationen	2
3. Bedienung Montage	3
3.1 Montieren	3
3.2 Montagebeispiele	3
3.3 Zerlegen	3
4. Technische Daten	4
4.1 Kennzeichnungen auf dem Produkt	4
4.2 Maße und Gewichte	4
4.3 Materialien	4
5. Instandhaltung	4
5.1 Instandhaltung (Reinigung/Desinfektion)	4
5.2 Instandhaltung (Wartung)	4
6. Störungen	4
7. Entsorgung	4



1. Allgemein

1.1 Allgemeine Informationen



Lesen Sie unbedingt vor der Benutzung diese Gebrauchsanleitung und die Gebrauchsanleitung des QuattroPlus Haltegriffes (falls nicht vorhanden unbedingt anfordern!) sorgfältig durch und befolgen Sie die Sicherheitshinweise.

Diese Gebrauchsanleitung für späteres Nachlesen aufbewahren und an weitere Benutzer weitergeben!

1.2 Erklärungen/Symbole in der Anleitung und auf dem Griff

	Gebrauchsanleitung beachten! (ISO 7010; M002)
	Für Personen mit einer Sehschwäche; kann im Internet für diese Anleitung unter https://www.mobeli.de/download-bereich die Schriftgröße entsprechend eingestellt werden.
	Warnhinweise (Weisen auf eine gefährliche Situation hin)
	Hersteller (zusätzlich auf der Griffstange Herstellungsjahr)
	Bestellnummer
	Maximales Benutzergewicht
	Die mobilen MOBELI Haltegriffe sind konform mit der Verordnung (EU) 2017/745
	Die mobilen MOBELI Haltegriffe sind Medizinprodukte der Klasse I
	Chargenbezeichnung

1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung und Einsatzbereich:



Die Diagonalgelenkadapter dürfen nur als Zubehör für QuattroPlus Haltegriffe **14002 41S, 14002 42S, 14002 43S, 14002 44S** verwendet werden. Die Diagonalgelenkadapter erhöhen die Flexibilität dieser Haltegriffe zur weitgehend selbständigen Nutzung von Dusche, Badewanne, Toilette und Waschbecken. Durch die schnell aufklipsbaren Diagonalgelenk-Adapter sind die Griffe jetzt auch diagonal montierbar. Dies eignet sich speziell bei versetztem Fugenbild oder zu dem versetzten winkligen Anbringen der Griffstange.



Achtung! Der Griff darf nicht als Sitz verwendet werden.

Jede weitere Verwendung, z.B. als Sitz, Tragegriff oder als Steighilfe ist nicht erlaubt.

1.4 Nutzungsdauer

Die zu erwartende Nutzungsdauer beträgt (bei täglicher und bestimmungsgemäßer Verwendung) in einer Einrichtung/ Institution sechs Jahre. Voraussetzung dafür sind die Einhaltung der Wartungs- und Sicherheitsvorschriften, die in dieser Gebrauchsanleitung angegeben sind. Die tatsächliche Nutzungsdauer kann abhängig von Häufigkeit und Intensität der Verwendung variieren. Diese Griffe sind geprüft nach ISO 17966:2016.

1.5 Wiedereinsatz

Das Produkt ist für den wiederholten Gebrauch geeignet. Wie oft das Produkt eingesetzt werden kann, hängt von der Art der Verwendung ab. Reinigen, desinfizieren und überprüfen Sie das Produkt vor dem erneuten Gebrauch gründlich.

2. Sicherheitsinformationen




- Vor jeder Benutzung des QuattroPlus Haltegriffes mit den Diagonalgelenkadapttern muss die Anleitung der QuattroPlus Haltegriffe beachtet werden.
- Das maximale Benutzergewicht der QuattroPlus Haltegriffe reduziert sich bei der Benutzung des Diagonalgelenk-Adapters auf 120 kg!
- Die Diagonalgelenk-Adapter dürfen nur in funktionsfähige QuattroPlus Haltegriffe eingesetzt werden.
- Beschädigte Aufkleber unbedingt ersetzen.

3. Bedienung Montage

3.1 Montieren

Zuerst das Teleskop aus dem Griff ausklipsen (siehe Bedieninfo QuattroPlus Haltegriff)

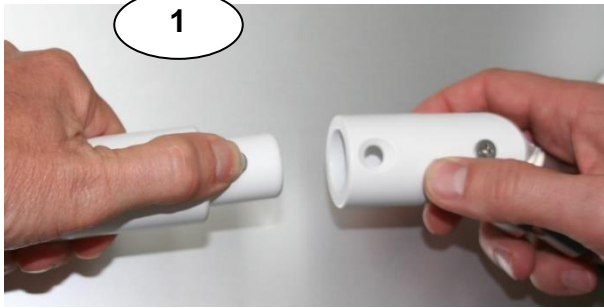

Schnellverriegler des Teleskopgriffes eindrücken und in den Diagonalgelenk-Adapter stecken.



Danach Schnellverriegler des Diagonalgelenk-Adapters eindrücken und in das Kreuzgelenk schieben


! Der QuattroPlus Griff mit den Diagonalgelenkadaptoren darf nur bei festem Halt der Schnellverriegler benutzt werden. Unbedingt nach der Montage sicheren Halt durch Ziehen am Griff überprüfen.

3.2 Montagebeispiele für den QuattroPlus Haltegriff mit Diagonalgelenkadapter

Winkliges anbringen in Glasdusche, Badewanne oder am Waschbecken.



Versetztes Fugenbild →

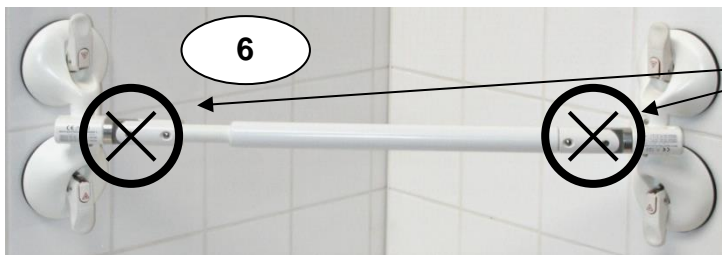

Achtung! Quetschgefahr!
Nur im Bereich des Teleskopgriffes festhalten, keinesfalls im Bereich des Diagonalgelenkadapters.



3.3 Zerlegen (Bild 7)

Den Schnellverriegler vom Diagonalgelenkadapter mit der roten Eindrückhilfe vom QuattroPlus Haltegriff eindrücken und aus den Kreuzteilen auf beiden Seiten herausziehen.



4. Technische Daten

4.1 Kennzeichnungen auf dem Produkt: (Erklärungen der Symbole siehe Seite 2)



Unbedingt die Kennzeichnung des Haltegriffes beachten und berücksichtigen, dass sich das max. Benutzergewicht der Haltegriffe bei der Benutzung der Diagonalgelenk-Adapter auf 120 kg reduziert! Siehe Laserung vom Adapter (Pfeil).



4.2 Maße und Gewichte:

Das Diagonalgelenkadapterpaar wiegt zusammen 250 Gramm.

Die Gesamtlänge des QuattroPlus Haltegriffes verlängert sich um 170 mm.

4.3 Materialien:

Stahlteile aus Edelstahl, Aluminiumteile aus seewasserbeständigem Material, Kunststoffteile aus POM

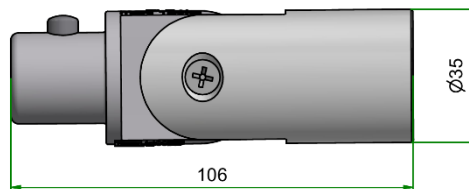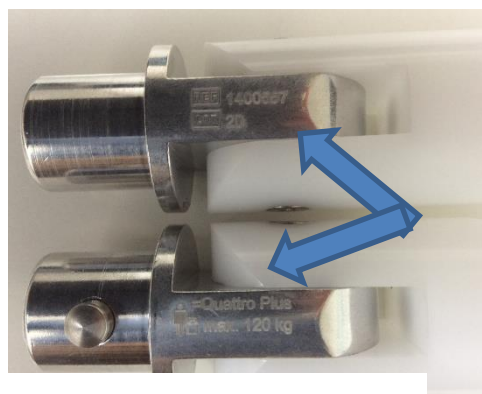

5. Instandhaltung

5.1 Instandhaltung (Reinigung/Desinfektion):



- Die Diagonalgelenkadapter sind beständig gegen die Wirkstoffe der von der DGHM (Desinfektionsmittel-Kommission der deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie) zertifizierten Hände- und Flächendesinfektionsmittel, mit Ausnahme von Phenoletter, Pyridinderivat und Thiocyanat.
- Reinigen Sie diese mit haushaltsüblichen Reinigungsmitteln, wie Seifenlauge. Achten Sie darauf, jegliche Seifen- bzw. Schaumreste nach dem Gebrauch, z.B. nach dem Duschen, gründlichst zu entfernen. (Ansonsten kann sich Rost an den Edelstahlteilen ansetzen)
- Keine scheuernden oder aggressiven Putzmittel verwenden, auf keinen Fall Verdünner oder Benzin.
- Keine Reinigungsmittel verwenden, die Kunststoffe angreifen.

5.2 Instandhaltung (Wartung):

Prüfen Sie Diagonalgelenkadapter auf Beschädigungen und benutzen Sie keine beschädigten Teile.

6. Störungen:

 (siehe in den Gebrauchsanleitungen der jeweiligen Haltegriffe)

7. Entsorgung:

Die Geräteverpackung wird der Wertstoffwiederverwendung zugeführt. Die Metallteile werden der Altmetallverwertung zugeführt. Die Entsorgung muss gemäß den jeweiligen nationalen gesetzlichen Bestimmungen erfolgen. Erfragen Sie bitte bei der Stadt-/Gemeindeverwaltung nach örtlichen Entsorgungsunternehmen.

Diese ROTH Mobilien Haltegriffe dürfen nicht in die USA exportiert werden (siehe USA Version).

Technische Änderungen vorbehalten.

Eine Marke der



ROTH® Sanitärprogramme GmbH
D-72213 Altensteig
Kohlbergstraße 5
Tel.: (+49) 07453/9381-0 Fax - 23
eMail: info@mobeli.de
Internet: www.mobeli.de

MOBELI®