


MOBELI®

ROTH® GmbH
Kohlbergstraße 5
D-72213 Altensteig
Tel.: (+49) 07453/9381-0 Fax - 23
E-Mail: info@mobeli.de
Internet: www.mobeli.de

QuattroPower Stützgriff mit Vakuum-Sicherheitsanzeige

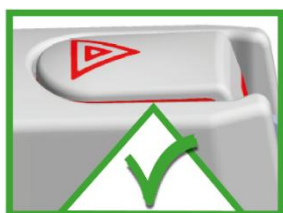

CE



DE

Gebrauchsanweisung QuattroPower Stütz

REF 1400265S, 1400266S



Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemein	2
1.1	Allgemeine Informationen	2
1.2	Erklärungen/Symbole in der Anleitung und auf dem Griff	3
1.3	Bestimmungsgemäße Verwendung	3
1.4	Indikationen	3
1.5	Kontraindikationen	3
1.6	Einsatzbereich des Produktes	3
1.7	Zu Ihrer Information	4
1.8	Nutzungsdauer	4
1.9	Wiedereinsatz	4
2.	Sicherheitsinformationen	4
3.	Bedienung Montage	5
3.1	Montage (siehe Seite 8)	5
3.2	Befestigen / Ansaugen (siehe Seite 10)	5
3.3	Lösen	5
3.4	Zerlegen (siehe Seite 9)	5
4.	Technische Daten	6
4.1	Kennzeichnungen auf dem Produkt	6
4.2	Tabelle Technische Daten	6
4.3	Materialien	6
5.	Instandhaltung	6
5.1	Instandhaltung (Reinigung/Desinfektion)	6
5.2	Instandhaltung (Wartung)	7
	Lagerung	7
6.	Störungen erkennen und beheben	7
7.	Entsorgung	7
8.	Bilder zur Bedienung	7
8.1	Bilder zur Montage	8
8.2	Bilder zur Demontage	9
8.3	Bilder zur Befestigung	10
8.4	Bilder zur Funktion der Vakuum Sicherheitsanzeige	11
9.	Zubehör	12

1. Allgemein

1.1 Allgemeine Informationen



Lesen Sie unbedingt vor der Benutzung diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und befolgen Sie die Sicherheitshinweise, um Ihre Sicherheit bei der Benutzung des mobilen QuattroPower Stützgriff zu gewährleisten.

Diese Gebrauchsanweisung für späteres Nachlesen aufbewahren und an weitere Benutzer weitergeben! Bei nicht Beachtung, der in der Gebrauchsanweisung genannten Sicherheitsregeln, ist jegliche Haftung unsererseits ausgeschlossen.

1.2 Erklärungen/Symbole in der Anleitung und auf dem Griff

	Gebrauchsanweisung muss gelesen werden! (ISO 7010; M002)
	Für Personen mit einer Sehschwäche; kann im Internet für diese Anleitung unter https://www.mobeli.de/download-bereich die Schriftgröße entsprechend eingestellt werden.
	Warnhinweise (Weisen auf eine gefährliche Situation hin)
	Hersteller (zusätzlich auf der Griffstange Herstellungsjahr)
	Bestellnummer
	Maximales Benutzergewicht
	Die mobilen MOBELI Haltegriffe sind konform mit der Verordnung (EU) 2017/745
	Die mobilen MOBELI Haltegriffe sind Medizinprodukte der Klasse I
	Chargenbezeichnung
	Eindeutige Produktidentifizierung (Unique Device Identification)
	Vor Sonnenlicht schützen



Allergiker Hinweis: Die hochwertigen Saugscheiben enthalten Naturkautschuklatex. Naturkautschuklatex kann allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischer Reaktionen auslösen.

1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung



Als Stützgriff oder Aufstehgriff für Erwachsene und Kinder. Die mobilen QuattroPower Stützgriffe sind entwickelt, um die natürliche Bewegung zu unterstützen. **Der Stützgriff ist nicht konstruiert, um das gesamte Körpergewicht zu tragen.** Jede weitere Verwendung, z.B. als Sitz, Tragegriff oder als Steighilfe ist nicht erlaubt. **Eine seitliche Belastung ist nicht zulässig, außer wenn eine Seitenarmverstärkung 1400668 (siehe Zubehör, Seite 12) angebracht wird.**

1.4 Indikationen

Geeignet für Personen mit: eingeschränkter Mobilität, Gleichgewichtsproblemen, muskulärer Schwäche (leichter bis moderater Ausprägung), postoperativem Rehabilitationsbedarf, Fähigkeitsstörungen.

1.5 Kontraindikationen

Der Haltegriff ist nicht geeignet für Personen, bei denen eine oder mehrere der folgenden Bedingungen vorliegen:

Kognitive Einschränkungen oder Demenz mit fehlender Fähigkeit zur sicheren Nutzung (außer die Pflegeperson oder eine Hilfsperson kann den Kipphebel absperren mit der Kipphebelsicherung (Zubehör) und überprüft den Vakuumzustand regelmäßig entsprechend für die vorhandene Oberfläche)

Personen mit Gewicht oberhalb des angegebenen maximalen Benutzergewichtes.

Ungeeignete nicht poren-dichte Oberflächen oder nicht haftende Oberflächen, auf denen keine sichere Befestigung gewährleistet werden kann

1.6 Einsatzbereich des Produktes



Anwendung des QuattroPower Stützgriffes ist für die weitgehend selbständige Nutzung in geschlossenen Räumen wie Dusche, Badewanne, Toilette und Waschbecken bestimmt. Die Anbringung der Vakuum-Saugscheiben ist nur auf glatten, unporösen und steifen Oberflächen, die poren- und dampfdicht, sauber, trocken und frei von Ölen/ Fetten sind, möglich. Auf rauen oder porösen Oberflächen verringert sich die Haftkraft und Haltedauer bzw. ist nicht vorhanden. Beachten Sie, dass Fliesen nicht zwingend plan und dampfdicht (vakuumgeeignet) sind. Testen Sie Ihre Fliesen und die Wand zuerst.

Da die Vakuum-Saugscheiben aus haftungsstarkem, weichelastischem Naturkautschuk hergestellt sind, können sich diese an leicht strukturierte Fliesen anpassen (Wichtig: reduzierte Haltedauer! Sicherheitsanzeige beachten).

Der mobile Haltegriff kann zuhause, z.B. für zeitlich befristete Einsätze nach einem Krankenhausaufenthalt oder zur Wohnraumerprobung ideal genutzt werden. Ebenso in Kliniken und Pflegeeinrichtungen zur zusätzlichen und kurzzeitigen Ergänzung von stationären Griffen.

Der mobile Haltegriff findet auch Anwendungen, wo stationäre Griffe nicht montiert werden können, z.B. in der Glasdusche oder in der Badewanne. Wenn das Anbohren der Wände nicht erlaubt (nicht möglich) ist, z.B. in einer Mietwohnung, oder wenn sich Wasser- und/oder Stromleitungen in der Wand befinden können.

1.7 Zu Ihrer Information

In Hotels und öffentlichen Einrichtungen in Europa müssen die Fliesen nach (DIN/EN 159 und 176) poren- und dampfdicht sein. Laut Fliesenkleber-Stoffnorm DIN EN 12004 ist für Fliesenkleber eine Mindesthaltekraft von 0,5 N/mm² vorgeschrieben. Bei z.B. zwei Fliesen mit 147 mm x 147 mm Fliesengröße x 0,05 kg/mm² würde dies eine Haltekraft von ca. 2160 kg ergeben. Selbst bei einer Klebefläche von 1/3 der Fliesenfläche (durch z.B. grobe Zahnpachtel) und nicht ausgefugter Fliesenfläche besteht noch eine Haltekraft von ca. 700 kg. Leider kann davon nicht immer ausgegangen werden, weshalb unbedingt die Haltekraft der jeweiligen Fliesen, oder anderer Oberflächenmaterialien, an der Wand vorher getestet werden muss. Auch können wegen Alterung des Materials oder bei Trockenbauweise geringere Haltekräfte bestehen, deshalb ist eine Prüfung notwendig (z.B. durch ruckartiges Belasten des Haltegriffes).

1.8 Nutzungsdauer

Die zu erwartende Nutzungsdauer beträgt (bei täglicher und bestimmungsgemäßer Verwendung) in einer Einrichtung/Institution sechs Jahre. Voraussetzung dafür sind die Einhaltung der Wartungs- und Sicherheitsvorschriften, die in dieser Gebrauchsanweisung angegeben sind. Die tatsächliche Nutzungsdauer kann abhängig von Häufigkeit und Intensität der Verwendung variieren. Die Griffe sind geprüft nach ISO 17966:2016.

1.9 Wiedereinsatz

Das Produkt ist für den wiederholten Gebrauch geeignet. Wie oft das Produkt eingesetzt werden kann, hängt von der Art der Verwendung ab. Reinigen und desinfizieren Sie das Produkt vor dem erneuten Gebrauch gründlich und überprüfen Sie den Griff sorgfältig; besonders die Funktion der Vakuum Sicherheitsanzeige.

2. Sicherheitsinformationen



- Die mobilen QuattroPower Stützgriffe **vor jeder Benutzung des mobilen QuattroPower Stütz muss die Vakuum-Sicherheitsanzeige beachtet werden und entsprechend den Anweisungen gehandelt werden (siehe Seite 11)**



- Selbst auf völlig poredichten, planen Fliesen kann nie genau bestimmt werden, wann das Vakuum nachlässt (z.B. durch Haarrisse), deshalb immer die Vakuum Sicherheitsanzeige beachten**
- Benutzen Sie den mobilen QuattroPower Stützgriff nur, wenn Sie Erfahrung im Umgang damit haben oder wenn Sie unter Aufsicht einer Person stehen, die Erfahrung im Umgang damit hat. Kinder dürfen den Griff nur unter Aufsicht benutzen oder Sie sichern die Kipphebel mit einer Kipphebelsicherung (siehe Zubehör, Seite 12).
- Vergewissern Sie sich vor jeder neuen Befestigung über die Funktionstüchtigkeit des mobilen QuattroPower Stützgriffes. Achten Sie insbesondere auf die Saugscheiben; sie müssen sauber und unbeschädigt sein und dürfen keine Risse oder Riefen aufweisen.

Verwenden Sie nie mobile QuattroPower Stützgriffe mit beschädigten Saugscheiben bzw. mit eingeschränkter Haltekraft.



- Bedenken Sie, dass der Haltegriff nur so gut hält wie der Untergrund; prüfen Sie also vor Benutzung an einem neuen Platz die Haftung des Untergrundes (z.B. der Fliese auf der Wand).
- Nach dem Umlegen der Kipphebel kann die durch Vakuum erzeugte Ansaug-Haltekraft ganz oder teilweise ausbleiben. Insbesondere bei unglasierten Fliesen, Naturstein (Marmor), Holz, sowie Keramik Belägen, welche durch Strukturierungen/Schliff oder feinraue Körnung rutschhemmend ausgerüstet sind. Dies wird durch Herausfahren der Sicherheitswippe der Vakuum-Sicherheitsanzeige sicht- und fühlbar!
- Achtung!** Bei Benutzung unter Wasser reduziert sich die Haltekraft.
- Die angegebene Haltekraft bezieht sich auf normale Raumtemperaturen (10°C – 30°C), bei hohen Temperaturen vermindert sich die Haltekraft. **Achtung:** Durch Sonneneinstrahlung oder durch Kontakt mit heißem Wasser können Temperaturen größer als 41° C erreicht werden, was zu Hautschädigung und/oder Verbrennung führen kann.
- Die angegebene Haltekraft bezieht sich auf eine Meeresspiegelhöhe von ca. 300 m über n.N., bei höher gelegenen Orten reduziert sich die Haltekraft (ca. 10 % je weiteren 1000 m Höhe).
- Setzen Sie die Saugscheibe keiner direkten UV-Strahlung (Sonnenlicht) aus, sie verliert sonst schnell ihre Elastizität. Daher Stützgriffe nie an einer Scheibe (z.B. einer Glasscheibe) anbringen die von außen beschienen wird. Falls keine andere Anbringungsmöglichkeit vorhanden ist, kann ein spezieller MOBELI-Aufkleber als UV-Schutz kostenlos bestellt werden (Best.-Nr. 1400AUFKL).
- Stellen Sie nichts unter den Stützgriff, was durch plötzliches Herunterfallen des Griffes beschädigt werden könnte, oder entfernen Sie den Griff nach der Benutzung.
- Die mobilen Stützgriffe dürfen nur mit einwandfrei eingerasteten Schnellverrieglern verwendet werden.**
- nicht an Fahrzeugblechen, Folien oder dünnen Gläsern ansaugen, da der Unterdruck diese Materialien beschädigen kann.
- Wird der mobile QuattroPower Stützgriff über längere Zeit eingesetzt, kann sich der Untergrund (z.B. Badewanne) dauerhaft durch die Saugscheibe einfärben.





- Nie MOBELI Produkte mit Teilen anderer Hersteller kombinieren. In diesem Falle erlöschen jegliche Gewährleistung und Haftung. **Unfallgefahr!!**

Sollte es im Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt zu einem schwerwiegenden Vorfall kommen, kontaktieren Sie den Hersteller dieses Produktes, sowie die zuständige Behörde in Ihrem Land.

Deutschland: Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte BfArM, www.bfarm.de.

3. Bedienung Montage

3.1 Montage (siehe Seite 8)

(Abb. 1) Schnellverriegler vom Stangen-Verbinder (B) eindrücken und in die kurze Stange (C) stecken bis der Schnellverriegler in der Bohrung einrastet. Danach (Abb. 2 Pfeil) lange Stange Teil D in Stangen-Verbinder (B) stecken. Die beiden Stangen (C und D) in die Saugkopf-Verbinder (A) stecken (Abb. 3)



Sicheren Halt der Schnellverriegler durch Auseinanderziehen testen!

Wenn nicht alle Schnellverriegler einwandfrei eingerastet sind, darf der Griff nicht verwendet werden!

3.2 Befestigen / Ansaugen (siehe Seite 10)

Video Auspacken



1. Überprüfen Sie den Untergrund und die Vakuum-Saugscheibe.
2. Reinigen Sie die Oberfläche des Untergrundes gründlich, (Abb. 11), damit diese **sauber** (von z.B. abgesäuerten Kalkschlämmen) und **fettfrei** ist. Ebenso muss die Oberfläche der Saugscheibe sauber sein.
3. **Drücken Sie die oberen Saugteller vom Stützgriff auf der anzusaugenden Oberfläche fest an.** (Abb. 13).
 - a. Die **Kipphebel** müssen dabei **gelöst** sein
 - b. Dabei ist zu beachten, dass beide Saugscheiben immer vollflächig auf Fliesen oder anderen Flächen **positioniert** sind, so dass keine Fuge unter der Saugscheibe ist und die Scheiben mindestens 10 mm über dem unteren Fugenrand (Abb. 12) angebracht werden.
4. Legen Sie, **bei gleichzeitigem Andrücken des Griffes und Andrücken des Kipphebels gegen die anzusaugende Oberfläche**, den ersten Kipphebel und danach den zweiten Kipphebel (Abb. 13, 15, 16, 17, 18) um.
5. Befestigen Sie die unteren Saugteller (Bild 14) dabei müssen Sie die Saugköpfe so drehen (siehe Pfeil), dass diese plan an der Wand sind (**durch die eingebauten Sicherheitsbremsen mit etwas Kraft drehen**).
6. Die Vakuum-Sicherheitsanzeige prüft kontinuierlich den aktuellen Vakuumzustand.
Nach Andrücken und Umlegen des Kipphebels müssen die Sicherheitswippen in den Kipphebeln **vollständig flächenplan eingefahren** (Seite 11, Abb. 19 und 21) sein! Im Laufe der Zeit, wenn das Vakuum nachlässt, fahren die Sicherheitswippen aus.
 - Ist eine rote Seitenflanke der Sicherheitswippen (Abb. 20 und 22) zu sehen, darf der Griff keinesfalls mehr benutzt werden und **muss sofort erneut angebracht werden!**
 - **Je deutlicher eine rote Seitenflanke der Wippen (Abb. 20 und 22) zu sehen ist, desto geringer ist die tatsächliche Haltekraft!**
7. Überprüfen Sie vor jeder Benutzung die Vakuum-Sicherheitsanzeige. Für Sehbehinderte oder Blinde ist diese fühlbar. Ist diese nicht eingefahren (wie eben beschrieben), so bringen Sie die Saugteller erneut an. Falls die Anzeigewippen nach dem Umlegen der Kipphebel noch herausstehen und auch nach Eindrücken der Wippen weiterhin herausstehen, muss der Griff neu befestigt werden (siehe Störungen, Seite 7).
Wird das Einfahren der Wippen nicht erreicht, keinesfalls den Griff benutzen!



3.3 Lösen

1. Mit dem Finger unter den Kipphebel greifen und anheben, gleichzeitig den Daumen auf die strukturierte Kipphebeleinbuchtung setzen, um den Rückschlageffekt zu verhindern. **Vorsicht - es besteht bei falscher Bedienung eine Quetschgefahr.**
2. Etwas warten! Die Saugscheiben entspannen sich nach ca. 30-60 Sekunden. Nun kann der Saugteller von der Wand entfernt werden. Sollten die Saugscheiben weiterhin anhaften, können Sie zusätzlich die Scheiben an einer Seite (zwischen Wand und Saugscheibe) mit einem Finger anheben, so dass Luft unter diese gelangen kann.
3. **Versuchen Sie nicht, die Saugscheibe mit scharfkantigen Gegenständen oder Werkzeugen zu lösen; Sie würden sie beschädigen.**
4. Den mobilen Stützgriff bei Nichtbenutzung mit entspannten Saugscheiben (Kipphebel gelöst), plan und flächig lagernd aufbewahren. Schützen Sie Ihren mobilen Stützgriff (z.B. im Karton) gegen UV-Strahlen.



3.4 Zerlegen (siehe Seite 9)

Schnellverriegler der Stangen mit beiliegender Eindrückhilfe (**ohne** rotes Teil) eindrücken und die Stange aus dem festgehaltenen Saugkopf-Verbinder ziehen (Abb. 5 und 6).

Schnellverriegler (Abb. 7 siehe Pfeile) mit beiliegender Eindrückhilfe (**mit** rotem Teil) eindrücken und die Stangen aus dem festgehaltenen Stangen-Verbinder ziehen (Abb. 8).

Zerlegen der Stangen-Verbinder und Saugteile: Schnellverriegler (Abb. 9) vom Saugkopf-Verbinder mit Hilfe der mitgelieferten Eindrückhilfe (**ohne** rotes Teil) eindrücken und das Sauggehäuse aus dem festgehaltenen Saugkopf-Verbinder ziehen (Abb. 10).



Bei der Benutzung anderer Gegenstände als der Eindrückhilfe besteht die Gefahr, dass Sie den Schnellverriegler aus seiner Führung drücken!

(Aus den zerlegten QuattroPower Stütz können 2 Griffe erstellt werden, siehe dazu die Bilder 4 und 7 bzw. das Video)

4. Technische Daten


4.1 Kennzeichnungen auf dem Produkt

(Erklärungen der Symbole siehe Seite 3)

Oben auf der kurzen Griffstange    1400265S    max. 80 kg  xx

Unten auf der langen Griffstange      ROTH GmbH D-72213 Altensteig 202X

    xx  

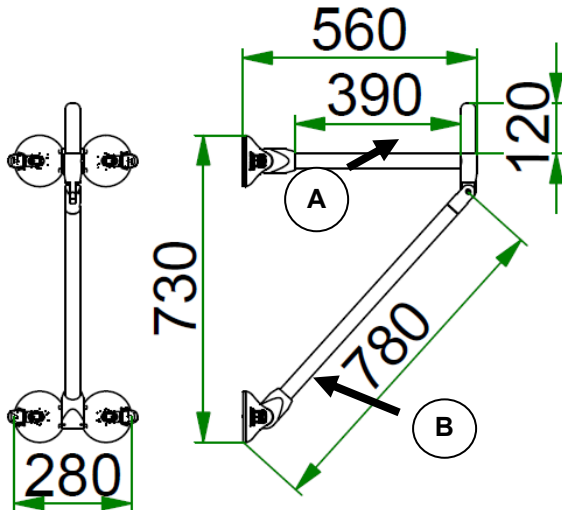

Durch das Mobeli Baukastensystem kann das zusätzliche Griffhorn von 120 mm auch nachträglich angebracht werden.

Die Bestell Nr. 1400265S ist ohne Griffhorn und die Bestellnummer 1400266S der QuattroPower-Stützgriff mit dem Griffhorn

Max. Benutzergewichte der Tabelle Technische Daten und auf der Griffstange unbedingt beachten!
Die mobilen QuattroPower-Stützgriffe sind entwickelt, um die natürliche Bewegung zu unterstützen. Sie sind nicht konstruiert, um das gesamte Körpergewicht zu tragen!

4.2 Tabelle Technische Daten



 ROTH-Best. Nr.	Wandabstand in mm	Handgrifflänge	Breite in mm	Griff Ø in mm	Max. Benutzergewicht in kg	Griff Gewicht in kg
14002 65S	560	390	280	35	80	3,1
14002 66S	560	390 und 120	280	35	80	3,3

4.3 Materialien

Griffstange aus hochschlagzähem PVC, alle Metallteile aus Edelstahl
 Saugscheibe aus NBR, Sauggehäuse aus PA 6.6, Gelenkteile aus POM

5. Instandhaltung

5.1 Instandhaltung (Reinigung/Desinfektion)

- Reinigen Sie die den Stützgriff mit einem Tuch mit haushaltsüblichen Reinigungsmitteln, wie Seifenlauge aber verwenden Sie dabei keine scheuernden oder aggressiven Putzmittel. Verwenden Sie auf keinen Fall Verdünner oder Benzin und keine Reinigungsmittel, die Kunststoffe angreifen.
- Brausen Sie den Stützgriff gründlich mit warmem Wasser ab bis alle Seifen- bzw. Schaumreste entfernt sind. (Ansonsten kann sich Rost an den Edelstahlteilen ansetzen).
- Halten Sie die Saugscheiben immer frei von Staub und Schmutz indem Sie diese mit warmem Wasser abspülen und danach mit einem fusselfreien Tuch abtrocknen.
- Eine Grundreinigung der Saugscheiben mit unserem Reiniger (Best. Nr. 1400680) oder Isopropanol, erhöht die Saugwirkung und wird in größeren Zeitabständen empfohlen. Abhängig von der Häufigkeit der Nutzung und den Nutzungsgegebenheiten, z.B. nach Verwendung von ölhaltigen Badezusätzen. Diese Reinigungsmittel nur auf den Saugscheiben, jedoch nicht auf den Kunststoffteilen einsetzen.
- Desinfizieren Sie das Produkt, indem Sie alle Oberflächen mit einem Tuch mit Desinfektionsmittel abwischen.
- Beachten Sie in medizinischer Umgebung auch die „Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention“ auf der Internetseite des Robert Koch-Instituts www.rki.de.
- Der Stützgriff ist beständig gegen die Wirkstoffe der von der DGHM (Desinfektionsmittel-Kommission der deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie) zertifizierten Hände- und Flächendesinfektionsmittel, mit Ausnahme von Phenolether, Pyridinderivat und Thiocyanat.



- Für die Saugscheiben darf nur alkoholische Desinfektion ohne Rückfetter verwendet werden.

5.2 Instandhaltung (Wartung)

- Wenn der Griff für längere Zeit an der Wand befestigt ist, überdehnen sich die Saugscheiben. Deshalb empfehlen wir, den Griff ca. alle 14 Tage von der Wand zu lösen. Nun den Griff mit entspannten Saugscheiben über Nacht auf ebener Fläche liegen lassen. Am nächsten Morgen neu befestigen.
- Prüfen Sie die Saugscheiben regelmäßig auf mögliche Funktionseinschränkungen wegen verminderter Elastizität aufgrund von Alter, Abnutzung, Sonnenbestrahlung, unebener Lagerung, Riefen etc. Bei beschädigten Saugscheiben mit eingeschränkter Haltekraft sind die kompletten Saugköpfe (Ersatzteil Nr. 14002S) zu ersetzen oder die Saugscheiben (Nr. 1402721) vom geschulten Fachpersonal auszuwechseln. Wir empfehlen, alle Saugköpfe nach ca. 2 Jahren vom Fachgeschäft überprüfen/testen zu lassen oder auszuwechseln (Ersatzteil Nr. 14002S).
- Halten Sie die Vakuum-Sicherheitsanzeige immer frei von Schmutz!
- **Prüfen Sie den Griff regelmäßig auf Beschädigungen und benutzen Sie den Griff keinesfalls wenn dieser beschädigt ist.**



Lagerung



- Wenn der Griff für längere Zeit nicht benutzt wird, muss dieser mit entspannten Saugscheiben auf ebener Fläche (am besten in der Verpackung) vor Sonnenlicht geschützt gelagert werden.

6. Störungen erkennen und beheben

Störungen	Mögliche Fehlerursachen/Test	Behebung
Bei neuem Griff: Anzeige fährt nach kurzer Zeit aus	Kalk oder andere Verschmutzung auf dem Untergrund.	Reinigen Sie den Untergrund gründlich.
	Untergrund nicht porendicht, auch wenn dieser glatt aussieht oder Beschädigung am Untergrund (z.B. Haarriss in der Fliese). Testmöglichkeit: Befestigen Sie den Griff an einer Glasscheibe oder einem Spiegel und beobachten Sie die Anzeige. Fährt die Anzeige nun nicht mehr aus, liegt der Fehler am Untergrund.	Befestigen Sie den Griff, wenn dies möglich ist, an einer anderen Stelle mit einem porendichten Untergrund. Ist dies nicht möglich, können selbstklebende Edelstahlplatten (Best.-Nr. 1461418) aufgeklebt werden, auf welche die Griffe befestigt werden können. Siehe Zubehör.
Bei älterem Griff: Anzeige fährt nach kurzer Zeit aus	Saugscheiben zerkratzt oder beschädigt	Liegt eine Beschädigung vor können die Saugscheiben (Best.-Nr. 1402721) vom Fachhändler ausgewechselt werden oder der komplette Saugkopf (Best.-Nr. 14002S) wird ausgewechselt
Anzeigewippe steht nach der Befestigung noch etwas heraus	1. Kipphebel vor dem Umlegen nicht fest angedrückt!	Erneut den Griff befestigen und dabei den Kipphebel vorher fest andrücken. Siehe Video-Haltegriff befestigen (Seite 10 Abb.16 Pfeil 2).
	2. Die Saugscheibe ist überdehnt. Dies kommt vor, wenn der Griff über längere Zeit an der Wand befestigt war. Video-Haltegriff befestigen 	Den Griff über Nacht mit Kipphebel nach oben auf ebener Fläche lagern. Am nächsten Tag erneut befestigen, vor dem Umlegen den Kipphebel fest andrücken. Wenn nach Eindrücken der Sicherheitswippe diese weiterhin heraussteht, müssen die Saugscheiben vom Fachhändler ausgewechselt werden (Best.- Nr. 1402721) oder der komplette Saugkopf (Best.- Nr. 14002S) wird ausgewechselt.
Die Saugteller lassen sich nicht Plan an die Wand andrücken	Die eingebauten Sicherheitsbremsen verhindern eine Drehung der Saugköpfe.	Mit genügend Kraft lassen sich die Saugköpfe richtig einstellen (Seite 10 Abb. 13 und 14). Bitte lassen Sie sich von einem Fachmann helfen, falls Ihnen dies nicht möglich ist.
Der Schnellverriegler ist herausgefallen.	Ohne roten Zusatzteil die Schnellverriegler (Seite 8 und 9 Abb. 4 und 7) eingedrückt. Anderen Gegenstand zum Entriegeln genommen der zu lang war.	Die Schnellverriegler können vom Fachmann mit einem Werkzeug schnell wieder eingebaut werden. Falls diese verlorengehen können auch einzelne Teile nachbestellt werden.






7. Entsorgung

Die Geräteverpackung wird der Wertstoffwiederverwendung zugeführt. Die Metallteile werden der Altmittelverwertung zugeführt. Die Entsorgung muss gemäß den jeweiligen nationalen gesetzlichen Bestimmungen erfolgen. Erfragen Sie bitte bei der Stadt-/Gemeindeverwaltung nach örtlichen Entsorgungsunternehmen.

Diese ROTH Mobilten Stützgriffe dürfen nicht in die USA exportiert werden (siehe USA-Version)!
Technische Änderungen vorbehalten.






8. Bilder zur Bedienung

8.1 Bilder zur Montage

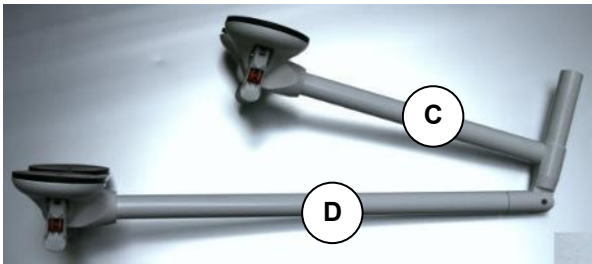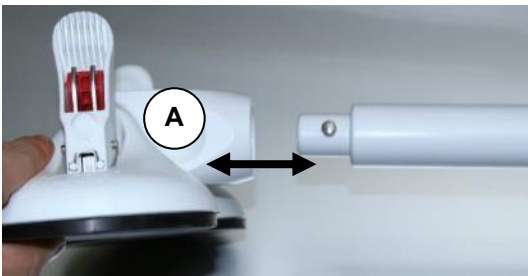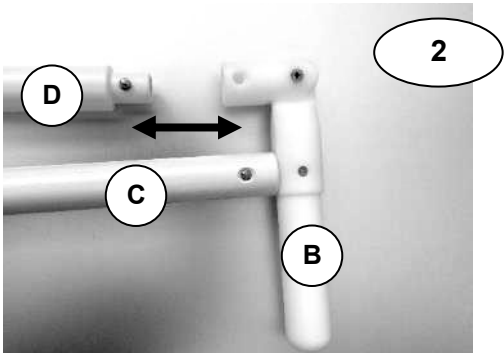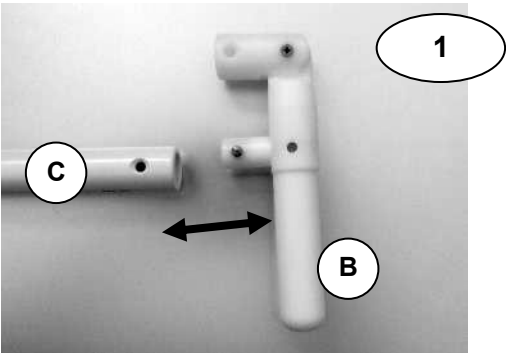
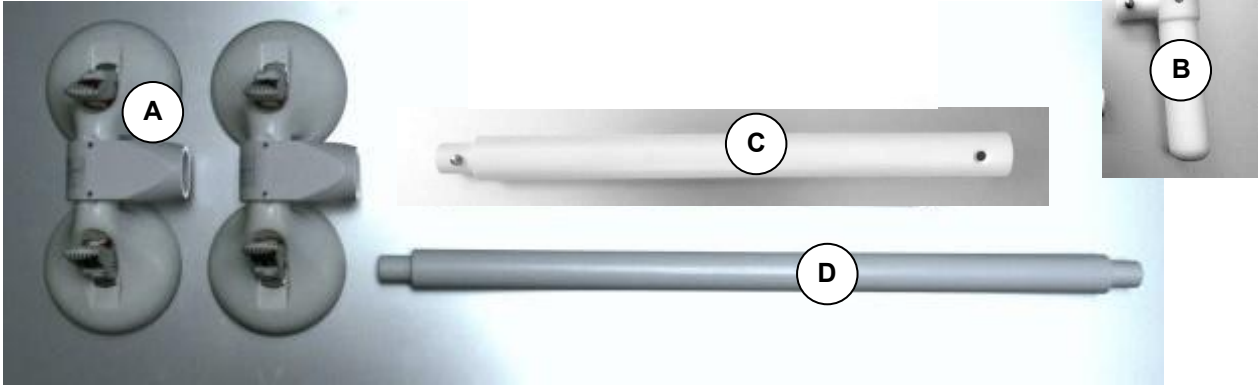


Video QuattroPower zerlegen

8.2 Bilder zur Demontage

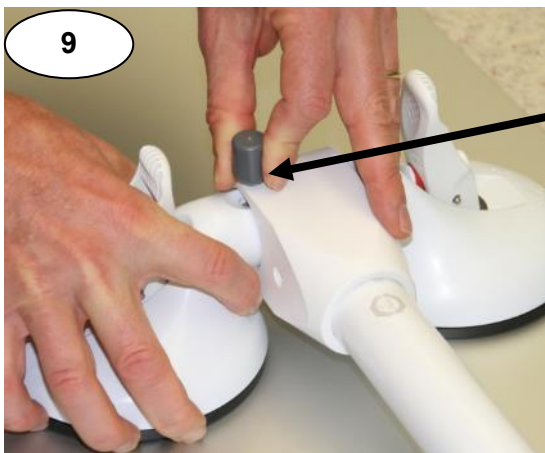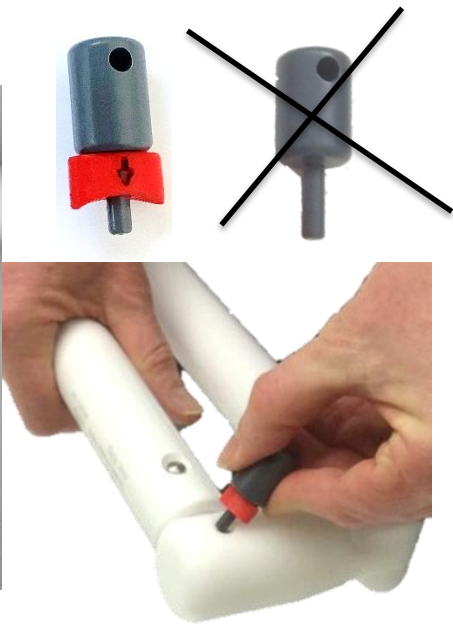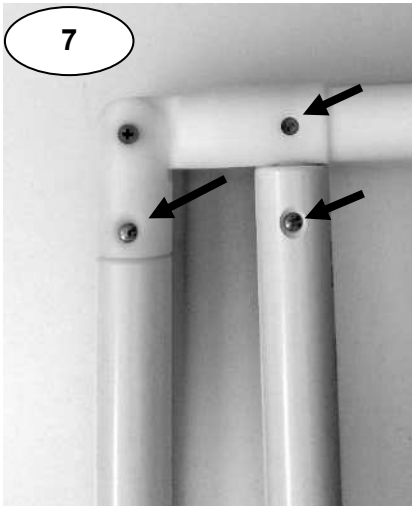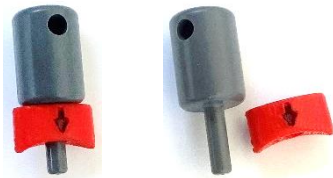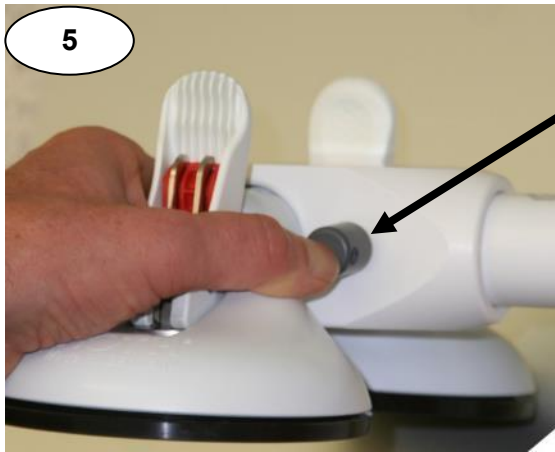

8.3 Bilder zur Befestigung

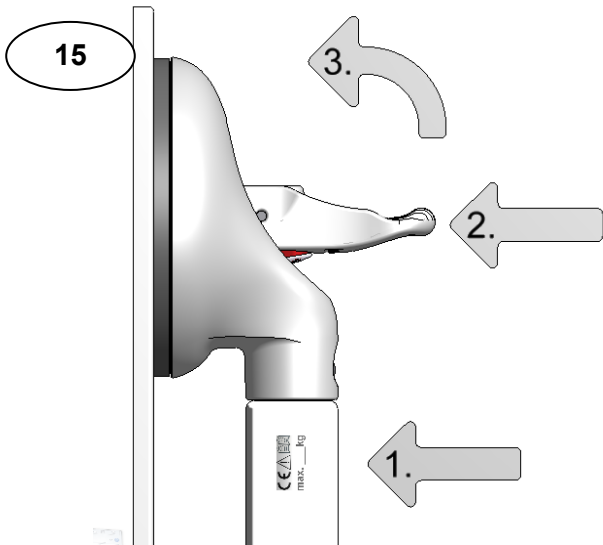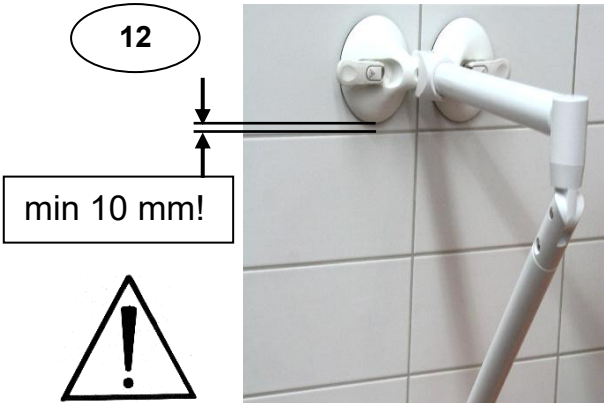



Richtig!




Haltekraft zu gering!

Haltegriff muss sofort erneut angebracht werden.


Unfallgefahr!

Funktionsweise der Sicherheitswippe: Das Vakuum wird permanent geprüft!

Erklärung der Symbole auf den Haltegriffen:

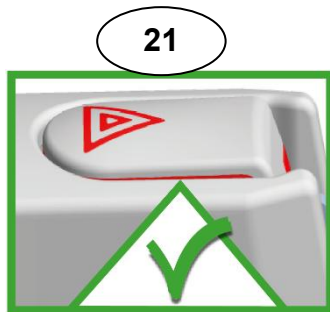

Die volle Sicherheit für das angegebene maximale Benutzergewicht.

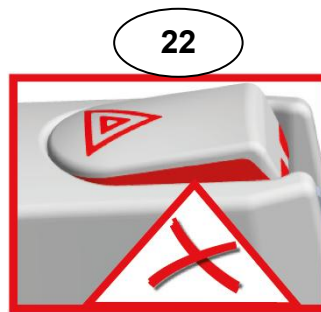

Achtung: Der Griff muss sofort neu befestigt werden!

Das Vakuum des Haltegriffs ist reduziert. Der Griff ist nicht mehr für das maximale Benutzergewicht zulässig. (Nur zur Information: eine reduzierte Haltekraft ist weiterhin vorhanden.)

9. Zubehör

Zubehör erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

Damit unbefugte Personen (z.B. dementiell erkrankte Personen, Kinder oder im öffentlichen Bereich) den Griff nicht öffnen können, empfehlen wir unsere Kipphebelsicherung.

REF

1400674 (4 Sicherungen, 1 Schlüssel)

Video-Kipphebelsicherung



Kipphebelverlängerung
flexible Kontrastringe
Edelstahlplatten

Best.-Nr. 1400574, bei zu geringer Kraft den Kipphebel zu Betätigen
Best.-Nr. 1402766, für besseren Kontrast bei Sehbehinderung
Best.-Nr. 1461418, bei nicht porenichten Fliesen

Video-Kipphebelverlängerung



WC-Papier Doppelhalter **REF** 1400650

Der WC-Papier-Halter für zwei WC-Rollen ist einfach und schnell am QuattroPower aufgesteckt.



Seitenarmverstärkung **REF** 1400668

Bei seitlicher Belastung des Stützgriffes.

Video Seitenarm-
verstärkung



Sollten Sie weitere Informationen und Videos zu den Produkten benötigen

finden Sie diese auf unserer Internetseite: www.mobeli.de

Die Gebrauchsanweisung im Downloadbereich: www.mobeli.de/download-bereich

MOBELI®

Eine Marke der



ROTH® GmbH

Kohlbergstraße 5

D-72213 Altensteig

Tel.: (+49) 07453/9381-0 Fax - 23

E-Mail: info@mobeli.de

Internet: www.mobeli.de