


QuattroPlus Haltegriffe mit Vakuum-Sicherheitsanzeige

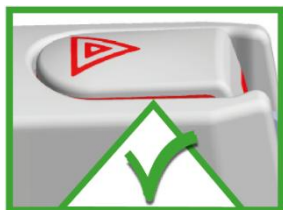

Gebrauchsanweisung QuattroPlus Haltegriff

REF

1400241S, 1400242S, 1400243S, 1400244S



Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemein.....	2
1.1	Allgemeine Informationen	2
1.2	Erklärungen/Symbole in der Anleitung und auf dem Griff	3
1.3	Bestimmungsgemäße Verwendung.....	3
1.4	Indikationen.....	3
1.5	Kontraindikationen	3
1.6	Einsatzbereich des Produktes	3
1.7	Zu Ihrer Information	4
1.8	Nutzungsdauer.....	4
1.9	Wiedereinsatz	4
2.	Sicherheitsinformationen	4
3.	Bedienung Montage	5
3.1	Montage (siehe Seite 9).....	5
3.2	Befestigen / Ansaugen (siehe Seite 8 und 9)	5
3.3	Lösen	5
3.4	Zerlegen (siehe Seite 9).....	5
4.	Technische Daten.....	6
4.1	Kennzeichnungen auf dem Produkt.....	6
4.2	Tabelle Technische Daten	6
4.3	Materialien	6
5.	Instandhaltung	6
5.1	Instandhaltung (Reinigung/Desinfektion).....	6
5.2	Instandhaltung (Wartung)	7
5.3	Lagerung.....	7
6.	Störungen erkennen und beheben.....	7
7.	Entsorgung	7
8.	Bilder zur Bedienung	8
8.1	Bilder zu Befestigung	8
8.2	Bilder zur Montage / Demontage	9
8.3	Bilder zur Funktion der Vakuum Sicherheitsanzeige	10
9.	Zubehör	11



1. Allgemein

1.1 Allgemeine Informationen

Lesen Sie unbedingt vor der Benutzung diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und befolgen Sie die Sicherheitshinweise, um Ihre Sicherheit bei der Benutzung des mobilen QuattroPlus zu gewährleisten.

Diese Gebrauchsanweisung für späteres Nachlesen aufbewahren und an weitere Benutzer weitergeben!

Bei nicht Beachtung, der in der Gebrauchsanweisung genannten Sicherheitsregeln, ist jegliche Haftung unsererseits ausgeschlossen.

1.2 Erklärungen/Symbole in der Anleitung und auf dem Griff

	Gebrauchsanweisung muss gelesen werden! (ISO 7010; M002)
	Für Personen mit einer Sehschwäche; kann im Internet für diese Anleitung unter https://www.mobeli.de/download-bereich die Schriftgröße entsprechend eingestellt werden.
	Warnhinweise (Weisen auf eine gefährliche Situation hin)
	Hersteller (zusätzlich auf der Griffstange Herstellungsjahr)
	Bestellnummer
	Maximales Benutzergewicht
	Die mobilen MOBELI Haltegriffe sind konform mit der Verordnung (EU) 2017/745
	Die mobilen MOBELI Haltegriffe sind Medizinprodukte der Klasse I
	Chargenbezeichnung
	Eindeutige Produktidentifizierung (Unique Device Identification)
	Vor Sonnenlicht schützen



Allergiker Hinweis: Die hochwertigen Saugscheiben enthalten Naturkautschuklatex. Naturkautschuklatex kann allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischer Reaktionen auslösen.

1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung



Als Haltegriff oder Aufstehgriff für Erwachsene und Kinder. Die mobilen Haltegriffe sind entwickelt, um die natürliche Bewegung zu unterstützen. **Sie sind nicht konstruiert, um das gesamte Körpergewicht zu tragen.**

Jede weitere Verwendung, z.B. als Sitz, Tragegriff oder als Steighilfe ist nicht erlaubt.

1.4 Indikationen

Geeignet für Personen mit: eingeschränkter Mobilität, Gleichgewichtsproblemen, muskulärer Schwäche (leichter bis moderater Ausprägung), postoperativem Rehabilitationsbedarf, Fähigkeitsstörungen.

1.5 Kontraindikationen

Der Haltegriff ist nicht geeignet für Personen, bei denen eine oder mehrere der folgenden Bedingungen vorliegen:

Kognitive Einschränkungen oder Demenz mit fehlender Fähigkeit zur sicheren Nutzung (außer die Pflegeperson oder eine Hilfsperson kann den Kipphebel absperren mit der Kipphebelsicherung (Zubehör) und überprüft den Vakuumzustand regelmäßig entsprechend für die vorhandene Oberfläche)

Personen mit Gewicht oberhalb des angegebenen maximalen Benutzergewichtes.

Ungeeignete nicht porendichte Oberflächen oder nicht haftende Oberflächen, auf denen keine sichere Befestigung gewährleistet werden kann.

1.6 Einsatzbereich des Produktes



Die Anwendung des QuattroPlus Haltegriffes ist für die weitgehend selbständige Nutzung in geschlossenen Räumen wie Dusche, Badewanne, Toilette und Waschbecken bestimmt. Die Anbringung der Vakuum-Saugscheiben ist nur auf glatten, unporösen und steifen Oberflächen, die poren- und dampfdicht, sauber, trocken und frei von Ölen/ Fetten sind, möglich. Auf rauen oder porösen Oberflächen verringert sich die Haftkraft und Haltedauer bzw. ist nicht vorhanden.

Beachten Sie, dass Fliesen nicht zwingend plan und dampfdicht (vakuumgeeignet) sind.

Testen Sie Ihre Fliesen und die Wand zuerst.



Da die Vakuum-Saugscheiben aus haftungsstarkem, weichelastischem Naturkautschuk hergestellt sind, können sich diese an leicht strukturierte Fliesen anpassen (Wichtig: reduzierte Haltedauer! Sicherheitsanzeige beachten).

Der mobile Haltegriff kann Zuhause, z.B. für zeitlich befristete Einsätze nach einem Krankenhausaufenthalt oder zur Wohnraumerprobung ideal genutzt werden. Ebenso in Kliniken und Pflegeeinrichtungen zur zusätzlichen und kurzzeitigen Ergänzung von stationären Griffen.

Der QuattroPlus Haltegriff findet auch Anwendungen, wo stationäre Griffe nicht montiert werden können, z.B. in der Glasdusche oder in der Badewanne. Wenn das Anbohren der Wände nicht erlaubt (nicht möglich) ist, z.B. in einer Mietwohnung, oder wenn sich Wasser- und/oder Stromleitungen in der Wand befinden können.

1.7 Zu Ihrer Information

In Hotels und öffentlichen Einrichtungen in Europa müssen die Fliesen nach (DIN/EN 159 und 176) poren- und dampfdicht sein. Laut Fliesenkleber-Stoffnorm DIN EN 12004 ist für Fliesenkleber eine Mindesthaltekraft von 0,5 N/mm² vorgeschrieben. Bei z.B. vier Fliesen mit 147 mm x 147 mm Fliesengröße x 0,05 kg/mm² würde dies eine Haltekraft von ca. 4320 kg ergeben.

Selbst bei einer Klebefläche von 1/3 der Fliesenfläche (durch z.B. grobe Zahnpachtel) und nicht ausgefugter Fliesenfläche besteht noch eine Haltekraft von ca. 1400 kg.

Leider kann davon nicht immer ausgegangen werden, weshalb unbedingt die Haltekraft der jeweiligen Fliesen, oder anderer Oberflächenmaterialien, an der Wand vorher getestet werden muss. Auch können wegen Alterung des Materials oder bei Trockenbauweise geringere Haltekräfte bestehen, deshalb ist eine Prüfung notwendig (z.B. durch ruckartiges Belasten des Haltegriffes).

1.8 Nutzungsdauer

Die zu erwartende Nutzungsdauer beträgt (bei täglicher und bestimmungsgemäßer Verwendung) in einer Einrichtung/Institution sechs Jahre. Voraussetzung dafür sind die Einhaltung der Wartungs- und Sicherheitsvorschriften, die in dieser Gebrauchsanweisung angegeben sind. Die tatsächliche Nutzungsdauer kann abhängig von Häufigkeit und Intensität der Verwendung variieren. Die Griffe sind geprüft nach ISO 17966:2016.

1.9 Wiedereinsatz

Das Produkt ist für den wiederholten Gebrauch geeignet. Wie oft das Produkt eingesetzt werden kann, hängt von der Art der Verwendung ab. Reinigen und desinfizieren Sie das Produkt vor dem erneuten Gebrauch gründlich und überprüfen Sie den Griff sorgfältig besonders die Funktion der Vakuum Sicherheitsanzeige.

2. Sicherheitsinformationen



- **Vor jeder Benutzung des mobilen QuattroPlus Haltegriffes muss die Vakuum-Sicherheitsanzeige beachtet werden und entsprechend den Anweisungen gehandelt werden (siehe Seite 10)**



- **Selbst auf völlig porendichten, planen Fliesen kann nie genau bestimmt werden, wann das Vakuum nachlässt (z.B. durch Haarrisse), deshalb immer die Vakuum Sicherheitsanzeige beachten**
- Benutzen Sie den mobilen QuattroPlus Haltegriff nur, wenn Sie Erfahrung im Umgang damit haben oder wenn Sie unter Aufsicht einer Person stehen, die Erfahrung im Umgang damit hat. Kinder dürfen den Griff nur unter Aufsicht benutzen oder Sie sichern die Kipphebel mit einer Kipphebelsicherung (siehe Zubehör, Seite 11).
- Vergewissern Sie sich vor jeder neuen Befestigung über die Funktionstüchtigkeit des mobilen QuattroPlus Haltegriffes. Achten Sie insbesondere auf die Saug-Saugscheiben; sie müssen sauber und unbeschädigt sein und dürfen keine Risse oder Riefen aufweisen.



Verwenden Sie nie mobile QuattroPlus Haltegriffe mit beschädigten Saugscheiben bzw. mit eingeschränkter Haltekraft.

- Bedenken Sie, dass der Haltegriff nur so gut hält, wie der Untergrund; prüfen Sie also vor Benutzung an einem neuen Platz die Haftung des Untergrundes (z.B. der Fliese auf der Wand).
- Nach dem Umlegen der Kipphebel kann die durch Vakuum erzeugte Ansaug-Haltekraft ganz oder teilweise ausbleiben. Insbesondere bei unglasierten Fliesen, Naturstein (Marmor), Holz, sowie Keramik Belägen, welche durch Strukturierungen/Schliff oder feinraue Körnung rutschhemmend ausgerüstet sind. Dies wird durch Herausfahren der Sicherheitswippe der Vakuum-Sicherheitsanzeige sicht- und fühlbar!
- **Achtung!** Bei Benutzung unter Wasser reduziert sich die Haltekraft.
- Die angegebene Haltekraft bezieht sich auf normale Raumtemperaturen (10°C – 30°C), bei hohen Temperaturen z.B. Sauna vermindert sich die Haltekraft. **Achtung:** Durch Sonneneinstrahlung oder durch Kontakt mit heißem Wasser können Temperaturen größer als 41°C erreicht werden, was zu Hautschädigung und/oder Verbrennung führen kann.
- Die angegebene Haltekraft bezieht sich auf eine Meeresspiegelhöhe von ca. 300 m über n.N., bei höher gelegenen Orten reduziert sich die Haltekraft (ca. 10 % je weiteren 1000 m Höhe).
- Setzen Sie die Saugscheibe keiner direkten UV-Strahlung (Sonnenlicht) aus, sie verliert sonst schnell ihre Elastizität. Daher Haltegriffe nie an einer Scheibe (z.B. einer Glasscheibe) anbringen die von außen beschienen wird. Falls keine andere Anbringungsmöglichkeit vorhanden ist, kann ein spezieller MOBELI-Aufkleber als UV-Schutz kostenlos bestellt werden (Best.-Nr. 1400AUFKL).
- Stellen Sie nichts unter den Griff, was durch plötzliches Herunterfallen des Griffes beschädigt werden könnte, oder entfernen Sie den Griff nach der Benutzung.
- **Die mobilen Haltegriffe dürfen nur mit einwandfrei eingerasteten Schnellverrieglern verwendet werden.**
- Die mobilen QuattroPlus Haltegriffe nicht an Fahrzeugblechen, Folien oder dünnen Gläsern ansaugen, da der Unterdruck diese Materialien beulenartig beschädigen kann.



- Wird der mobile QuattroPlus Haltegriff über längere Zeit eingesetzt, kann sich der Untergrund (z.B. Badewanne) dauerhaft durch die Saugscheibe einfärben.
- Nie MOBELI-Produkte mit Teilen anderer Hersteller kombinieren. In diesem Falle erlöschen jegliche Gewährleistung und Haftung. **Unfallgefahr!**

Sollte es im Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt zu einem schwerwiegenden Vorfall kommen, kontaktieren Sie den Hersteller dieses Produktes, sowie die zuständige Behörde in Ihrem Land.

Deutschland: Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte BfArM, www.bfarm.de.

3. Bedienung Montage

3.1 Montage (siehe Seite 9)

Zusammensetzen: Schnellverriegler an der Griffstange eindrücken (Abb. 7 Pfeil) und in das Kreuzteil stecken, bis die Schnellverriegler in der Bohrung vom Kreuzteil eingerastet sind (Klickgeräusch). Hierbei ist zu beachten, dass die Kreuzteile nach oben stehen (Abb. 11b).

Sicheren Halt aller Schnellverriegler durch Auseinanderziehen testen!

Wenn nicht alle Schnellverriegler eingerastet sind, darf der Griff nicht verwendet werden.

Das Teleskop darf nicht mit nach untenstehenden Kreuzteil montiert werden (Abb. 11a)!

3.2 Befestigen / Ansaugen (siehe Seite 8 und 9)

Video Auspacken



1. Überprüfen Sie den Untergrund und die Vakuum-Saugscheibe.
2. Reinigen Sie die Oberfläche des Untergrundes gründlich, (Abb. 1), damit diese **sauber** (von z.B. abgesäuerten Kalkschlämmen) und **fettfrei** ist. Ebenso muss die Oberfläche der Saugscheibe sauber sein.
3. **Drücken Sie den mobilen Haltegriff auf der anzusaugenden Oberfläche fest an.** (Abb. 2 a,b,c,d).
 - a. Die **Kipphebel** müssen dabei **gelöst** sein
 - b. Dabei ist zu beachten, dass beide **Saugscheiben** immer **vollflächig** auf Fliesen oder anderen Flächen **positioniert** sind, so dass keine Fuge (Abb. 3 und 4) unter der Saugscheibe ist und die Scheiben mindestens 10 mm über dem unteren Fugenrand (Abb. 3) angebracht werden.
Durch das Teleskop können Sie dazu die Länge des Griffes verstellen (Abb.4 und 5).
 - c. Durch die eingebauten Gelenke ist es möglich, dass Sie den mobilen Haltegriff auch über Eck platzieren können (Abb.6).
4. Legen Sie, bei gleichzeitigem Andrücken des Griffes und Andrücken des Kipphebels gegen die anzusaugende Oberfläche (Abb. 2 a bis d), nacheinander alle vier Kipphebel (Abb. 2, 2 a,b,c,d) um.
5. Die Vakuum-Sicherheitsanzeigen prüfen kontinuierlich den aktuellen Vakuumzustand.
Nach Andrücken und Umlegen des Kipphebels müssen alle Sicherheitswippen in den Kipphebeln **vollständig flächenplan eingefahren** (Seite 10, Abb. 13 und 15) sein! Im Laufe der Zeit, wenn das Vakuum nachlässt fahren die Sicherheitswippen aus.
 - Ist eine rote Seitenflanke der Sicherheitswippen (Abb. 14 und 16) zu sehen, darf der Griff keinesfalls mehr benutzt werden und **muss sofort erneut angebracht werden!**
 - **Je deutlicher eine rote Seitenflanke der Wippen (Abb.14 und 16) zu sehen ist, desto geringer ist die tatsächliche Haltekraft!**
6. Überprüfen Sie vor jeder Benutzung die Vakuum-Sicherheitsanzeige. Für Sehbehinderte oder Blinde ist diese fühlbar. Ist diese nicht eingefahren (wie eben beschrieben), so bringen Sie den Saugteller erneut an. Falls die Anzeigewippen nach dem Umlegen der Kipphebel noch herausstehen und auch nach Eindrücken der Wippen weiterhin herausstehen, muss der Griff neu befestigt werden (siehe Störungen, Seite 7).
Wird das Einfahren der Wippe nicht erreicht, keinesfalls den Griff benutzen!

3.3 Lösen

1. Mit dem Finger unter den Kipphebel greifen und anheben, gleichzeitig den Daumen auf die strukturierte Kipphebeleinbuchtung setzen, um den Rückschlageffekt zu verhindern.
Vorsicht - es besteht bei falscher Bedienung eine Quetschgefahr.
2. Etwas warten! Die 4 Saugscheiben entspannen sich nach ca. 30-60 Sekunden. Nun kann der Saugteller von der Wand entfernt werden. Sollten die Saugscheiben weiterhin anhaften, können Sie zusätzlich die Scheiben an einer Seite (zwischen Wand und Saugscheibe) mit einem Finger anheben, so dass Luft unter diese gelangen kann.
3. **Versuchen Sie nicht, die Saugscheibe mit scharfkantigen Gegenständen oder Werkzeugen zu lösen; Sie würden sie beschädigen.**
4. Den mobilen QuattroPlus Haltegriff bei Nichtbenutzung mit entspannten Saugscheiben (Kipphebel gelöst siehe Seite 9 Bild 12), plan und flächig lagernd aufbewahren. Schützen Sie Ihren mobilen QuattroPlus Haltegriff (z.B. im Karton) gegen UV-Strahlen.

3.4 Zerlegen (siehe Seite 9)

Zerlegen der Griffstange:

Schnellverriegler (Abb. 8) vom Teleskop mit der roten Eindrückhilfe eindrücken und das Teleskop aus dem festgehaltenen Kreuzteil ziehen.

Zerlegen der Kreuz- und Saugteile:


Schnellverriegler (Abb. 9) vom Kreuzteilverbinder eindrücken und diesen aus dem festgehaltenen Sauggehäuse ziehen (Abb. 10).

4. Technische Daten

4.1 Kennzeichnungen auf dem Produkt

(Erklärungen der Symbole siehe Seite 3)

An der Griffstangenhinterseite (C) →

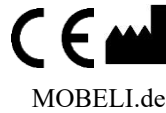

ROTH GmbH D-72213 Altensteig 202X

MD


REF

140024xS


LOT

xx



An der Griffstangenoberseite (D) →

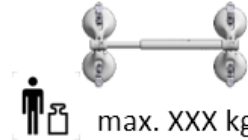

max. XXX kg

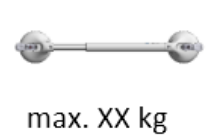

max. XX kg

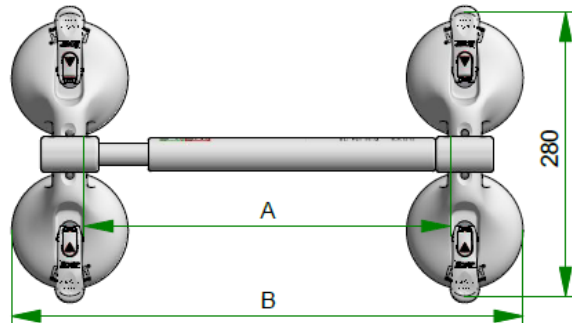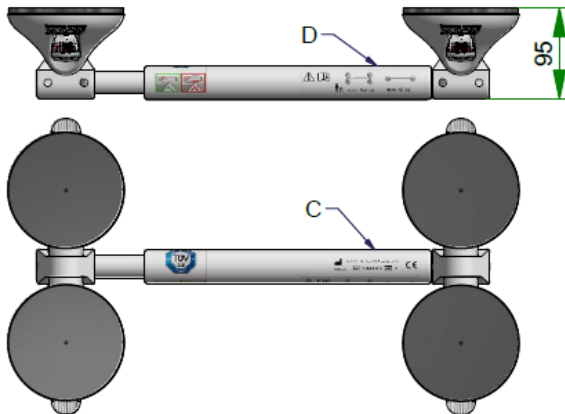

Max. Benutzergewichte der Tabelle Technische Daten und auf der Griffstange unbedingt beachten
Die mobilen QuattroPlus Haltegriffe sind entwickelt, um die natürliche Bewegung zu unterstützen.
Sie sind nicht konstruiert, um das gesamte Körpergewicht zu tragen!

4.2 Tabelle Technische Daten



REF	Grifflänge A (Teleskopgriff verstellbar) in mm	Gesamt Länge B in mm	Griff Ø in mm	Max. Benutzergewicht in kg	Griff Gewicht in kg
ROTH-Best. Nr.					
14002 41S	200-325	360-485	35	160	1,77
14002 42S	320-445	480-605	35	160	1,94
14002 43S	420-545	580-705	35	160	2,04
14002 44S	645-770	805-930	35	150	2,26

Die QuattroPlus-Griffe mit 4 Saugteller können auch zu Haltegriffen mit 2 Saugteller umgebaut werden.
 Dann sind die niedrigeren Werte auf der Griffstange zu berücksichtigen.

4.3 Materialien

Griffstange aus hochschlagzähem PVC, alle Metallteile aus Edelstahl
 Saugscheibe aus NBR, Sauggehäuse aus PA 6.6, Kreuzteile aus POM

5. Instandhaltung

5.1 Instandhaltung (Reinigung/Desinfektion)

- Reinigen Sie die den Haltegriff mit einem Tuch mit haushaltsüblichen Reinigungsmitteln, wie Seifenlauge aber verwenden Sie dabei keine scheuernden oder aggressiven Putzmittel. Verwenden Sie auf keinen Fall Verdünner oder Benzin und keine Reinigungsmittel, die Kunststoffe angreifen.
- Brausen Sie den Haltegriff gründlich mit warmem Wasser ab bis alle Seifen- bzw. Schaumreste entfernt sind. (Ansonsten kann sich Rost an den Edelstahlteilen ansetzen).
- Halten Sie die Saugscheiben immer frei von Staub und Schmutz indem Sie diese mit warmem Wasser abspülen und danach mit einem fusselfreien Tuch abtrocknen.
- Eine Grundreinigung der Saugscheiben mit unserem Reiniger (Best. Nr. 1400680) oder Isopropanol, erhöht die Saugwirkung und wird in größeren Zeitabständen empfohlen. Abhängig von der Häufigkeit der Nutzung und den

Nutzungsgegebenheiten, z.B. nach Verwendung von ölhaltigen Badezusätzen.
Diese Reinigungsmittel nur auf den Saugscheiben, jedoch nicht auf den Kunststoffteilen einsetzen.

- Desinfizieren Sie das Produkt, indem Sie alle Oberflächen mit einem Tuch mit Desinfektionsmittel abwischen.
- Beachten Sie in medizinischer Umgebung auch die „Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention“ auf der Internetseite des Robert Koch-Instituts www.rki.de.
- Der Haltegriff ist beständig gegen die Wirkstoffe der von der DGHM (Desinfektionsmittel-Kommission der deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie) zertifizierten Hände- und Flächendesinfektionsmittel, mit Ausnahme von Phenoether, Pyridinderivat und Thiocyanat.
- **Für die Saugscheiben darf nur alkoholische Desinfektion ohne Rückfetter verwendet werden.**



5.2 Instandhaltung (Wartung)

- Wenn der Griff für längere Zeit an der Wand befestigt ist, überdehnen sich die Saugscheiben. Deshalb empfehlen wir, den Griff ca. alle 14 Tage von der Wand zu lösen. Nun den Griff mit entspannten Saugscheiben über Nacht auf ebener Fläche liegen lassen. Am nächsten Morgen neu befestigen.
- Prüfen Sie die Saugscheiben regelmäßig auf mögliche Funktionseinschränkungen wegen verminderter Elastizität aufgrund von Alter, Abnutzung, Sonnenbestrahlung, unebener Lagerung, Riefen etc.
Bei beschädigten Saugscheiben mit eingeschränkter Haltekraft sind die kompletten Saugköpfe (Ersatzteil Nr. 14002S) zu ersetzen oder die Saugscheiben (Nr. 1402721) vom geschulten Fachpersonal auszuwechseln.
- Halten Sie die Vakuum-Sicherheitsanzeige immer frei von Schmutz!
- **Prüfen Sie den Griff regelmäßig auf Beschädigungen und benutzen Sie den Griff keinesfalls wenn dieser beschädigt ist.**



5.3 Lagerung

- Wenn der Griff für längere Zeit nicht benutzt wird muss dieser mit entspannten Saugscheiben auf ebener Fläche (am besten in der Verpackung) vor Sonnenlicht geschützt gelagert werden.



6. Störungen erkennen und beheben

Störungen	Mögliche Fehlerursachen/Test	Behebung
Bei neuem Griff: Anzeige fährt nach kurzer Zeit aus	Kalk oder andere Verschmutzung auf dem Untergrund.	Reinigen Sie den Untergrund gründlich.
	Untergrund nicht porendicht, auch wenn dieser glatt aussieht oder Beschädigung am Untergrund (z.B. Haarriss in der Fliese). Testmöglichkeit: Befestigen Sie den Griff an einer Glasscheibe oder einem Spiegel und beobachten Sie die Anzeige. Fährt die Anzeige nun nicht mehr aus, liegt der Fehler am Untergrund.	Befestigen Sie den Griff, wenn dies möglich ist, an einer anderen Stelle mit einem porendichten Untergrund. Ist dies nicht möglich, können selbstklebende Edelstahlplatten (Best.-Nr. 1461418) aufgeklebt werden, auf welche die Griffe befestigt werden können. Siehe Zubehör.
Bei älterem Griff: Anzeige fährt nach kurzer Zeit aus	Saugscheiben zerkratzt oder beschädigt	Liegt eine Beschädigung vor können die Saugscheiben (Best.-Nr. 1402721) vom Fachhändler ausgewechselt werden oder der komplette Saugkopf (Best.-Nr. 14002S) wird ausgewechselt
Anzeigewippe steht nach der Befestigung noch etwas heraus	1. Kipphebel vor dem Umlegen nicht fest angedrückt!	Erneut den Griff befestigen dabei den Kipphebel vorher fest andrücken. Siehe Video Haltegriff befestigen. (Seite 8 Abb. 2a Pfeil 2).
	2. Die Saugscheibe ist überdehnt. Dies kommt vor, wenn der Griff über längere Zeit an der Wand befestigt war.	Den Griff über Nacht mit entspannten Kipphebel auf ebener Fläche lagern (Seite 9 Abb.12). Am nächsten Tag erneut befestigen, vor dem Umlegen den Kipphebel fest andrücken. Wenn nach Eindrücken der Sicherheitswippe diese weiterhin heraussteht, müssen die Saugscheiben vom Fachhändler ausgewechselt werden (Best.-Nr. 1402721) oder der komplette Saugkopf (Best.-Nr. 14002S) wird ausgewechselt.
	Video Haltegriff befestigen 	






7. Entsorgung

Die Geräteverpackung wird der Wertstoffwiederverwendung zugeführt. Die Metallteile werden der Altmittelverwertung zugeführt. Die Entsorgung muss gemäß den jeweiligen nationalen gesetzlichen Bestimmungen erfolgen. Erfragen Sie bitte bei der Stadt-/Gemeindeverwaltung nach örtlichen Entsorgungsunternehmen.






Diese ROTH Mobilten QuattroPlus Haltegriffe dürfen nicht in die USA exportiert werden (siehe USA-Version). Technische Änderungen vorbehalten.

8. Bilder zur Bedienung

8.1 Bilder zu Befestigung

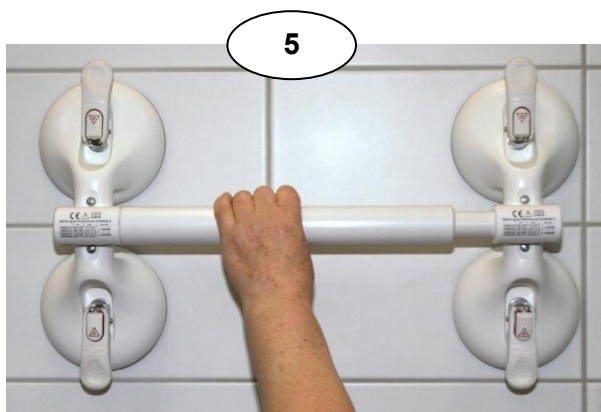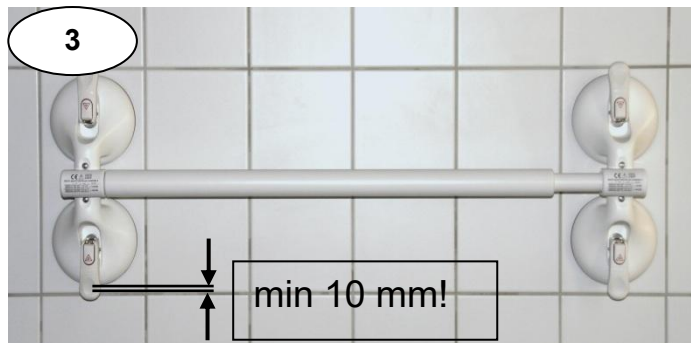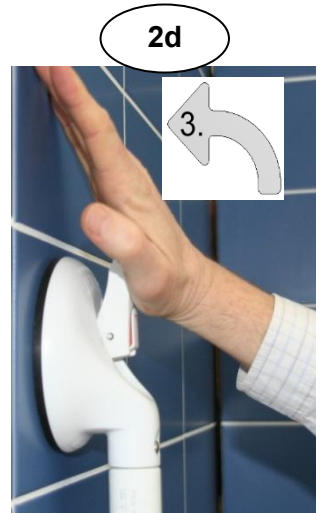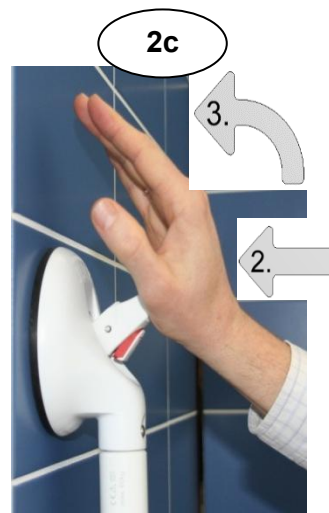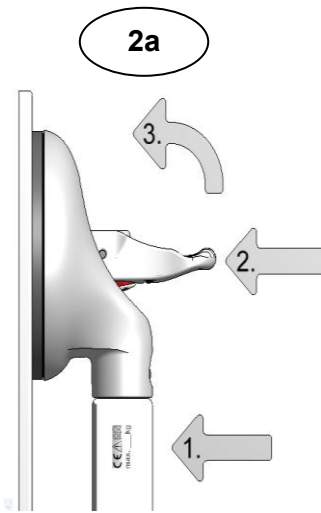

8.2 Bilder zur Montage / Demontage

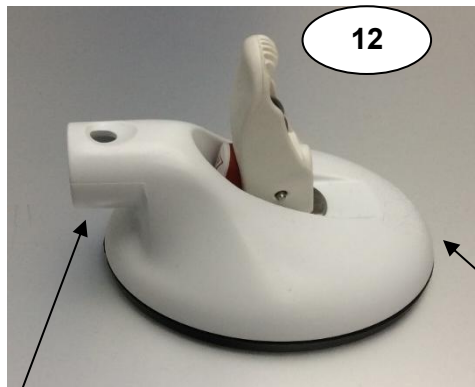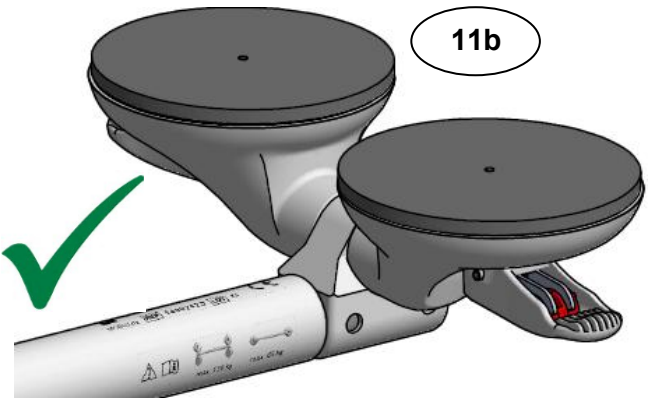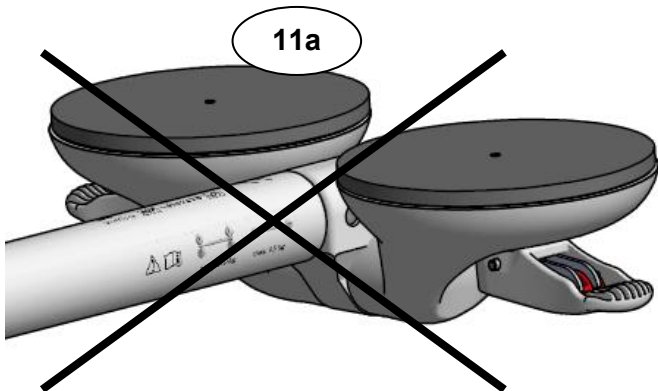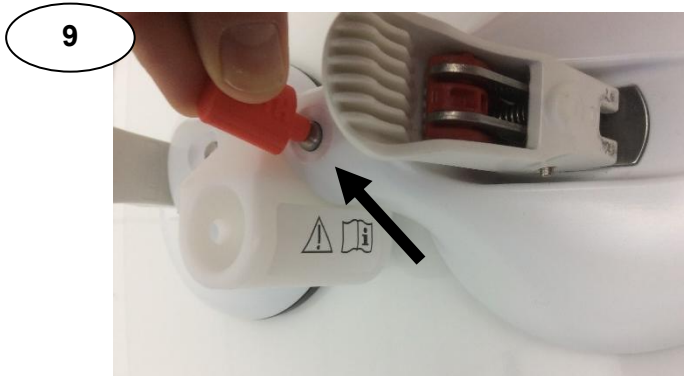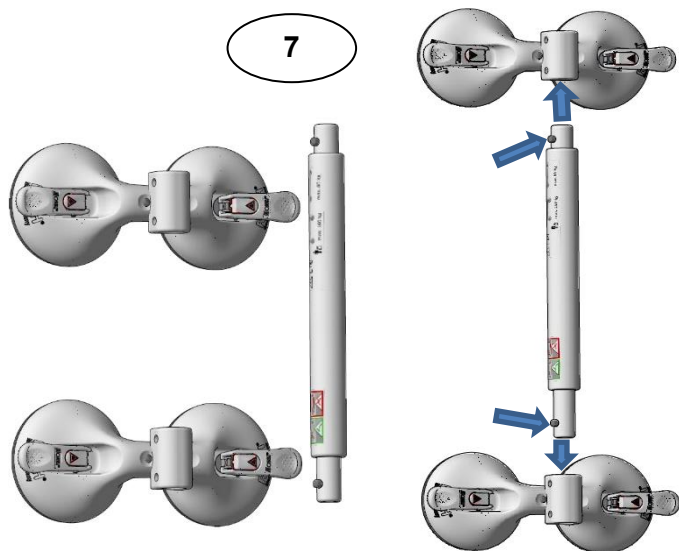

REF 14002S

MOBELI.COM
D-72213 Altensteig

ROTH® Made in Germany



Richtig!




Haltekraft zu gering!

Haltegriff muss sofort erneut angebracht werden.


Unfallgefahr!

Funktionsweise der Sicherheitswippe: Das Vakuum wird permanent geprüft!

Erklärung der Symbole auf den Haltegriffen:

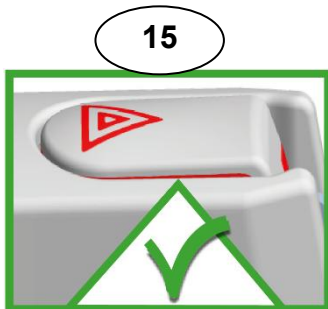

Die volle Sicherheit für das angegebene maximale Benutzergewicht.

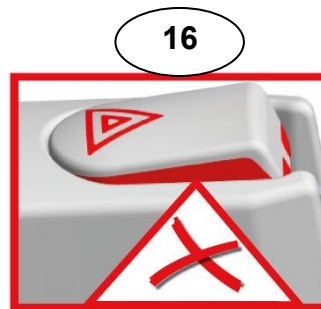

Achtung: Der Griff muss sofort neu befestigt werden!

Das Vakuum des Haltegriffs ist reduziert. Der Griff ist nicht mehr für das maximale Benutzergewicht zulässig.
(Nur zur Information: eine reduzierte Haltekraft ist weiterhin vorhanden.)

9. Zubehör

Zubehör erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

Damit unbefugte Personen (z.B. dementiell erkrankte Personen, Kinder oder im öffentlichen Bereich) den Griff nicht öffnen können, empfehlen wir unsere Kipphebelsicherung.

REF 1400674 (4 Sicherungen, 1 Schlüssel)

Video Kipphebelsicherung



Eine Grundreinigung mit unserem Reiniger (Best.-Nr. 1400680), erhöht die Saugwirkung und wird in größeren Zeitabständen, abhängig von der Häufigkeit der Nutzung und den Nutzungsgegebenheiten, empfohlen. (z.B. bei Verschmutzung oder nach Verwendung von ölhaltigen Badezusätzen)

Kipphebelverlängerung	Best.-Nr. 1400574, Kraftverstärkung zur Betätigung vom Kipphebel
flexible Kontrastringe	Best.-Nr. 1402766, für besseren Kontrast bei Sehbehinderung
Edelstahlplatten	Best.-Nr. 1461418, bei nicht porendichten Fliesen
Schutzteile	Best.-Nr. 1400682, Schutz der Saugscheibe beim Transport

Video Kipphebelverlängerung



Diagonalgelenkadapter:

Bestellnummer Diagonalgelenkadapter

REF 1400557

Achtung! Der Diagonalgelenkadapter reduziert das max. Benutzergewicht auf 120kg



Sollten Sie weitere Informationen und Videos zu den Produkten benötigen

finden Sie diese auf unserer Internetseite: www.mobeli.de

Die Gebrauchsanweisung im Downloadbereich: www.mobeli.de/download-bereich

Video MOBELI Produkte



Eine Marke der



MOBELI®

ROTH® GmbH

Kohlbergstraße 5

D-72213 Altensteig

Tel.: (+49) 07453/9381-0 Fax - 23

E-Mail: info@mobeli.de

Internet: www.mobeli.de