



Checkliste für Montage & Benutzung von Glubeli Power Haltegriffen zum Kleben

Wichtiger Hinweis: Erst die Gebrauchsanweisung gründlich lesen.

Alle Punkte müssen erfüllt und angekreuzt sein, bevor der Haltegriff montiert oder benutzt wird.

1. Benutzer & Belastung

- ☐ Das Benutzergewicht liegt **unterhalb** des angegebenen maximalen Benutzergewichts. Ist dieses nicht bekannt wurde auf das max. Benutzergewicht hingewiesen.

2. Untergrund & Montagefläche

- ☐ Die Montagefläche ist fest, tragfähig und dauerhaft mit der Wand verbunden.
☐ Die Oberfläche ist nicht porös.
☐ Die Oberfläche ist nicht beschichtet
☐ Kein Lotuseffekt
☐ Keine Nanobeschichtung
☐ Kein Anti-Haft-Belag

3. Kleber & Verarbeitung

- ☐ Mindesthaltbarkeit des Klebers geprüft (2 Jahre: Datum siehe Aufdruck auf dem Klebebeutel z.B. JJXXXWW J= Jahr W= Woche oder Aufkleber auf dem Klebe Set JJJ-MM).
☐ Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +5 °C und +40 °C.
☐ Während der Verarbeitung und Aushärtung wird für gute Belüftung gesorgt.
☐ Verarbeitungszeit nach Anmischen des Klebers wird eingehalten (< 10 Minuten).
(Nach Punkt 6. Montageausführung anzukreuzen)

4. Sicherheit bei der Verarbeitung

- ☐ Schutzhandschuhe werden getragen.
☐ Schutzbrille wird getragen.
☐ Arbeitsbereich ist ausreichend belüftet.

5. Montagevorbereitung

- ☐ Gebrauchsanweisung vollständig gelesen.
☐ Montagevideo angesehen.
☐ Montageflächen korrekt markiert.

6. Montageausführung

- ☐ Montagefläche ist sauber, fettfrei gereinigt und trocken.
 - ☐ Beide Klebevorrichtungen korrekt auf der Montagefläche platziert.
 - ☐ Klebeflächen der Griffstangenträger mit beiliegendem Schleifvlies angeraut (sehr wichtig zur Vermeidung von Oxidation).
 - ☐ Klebeflächen der Griffstangenträger mit iCleaner-Reinigungstuch gereinigt.
 - ☐ Montageflächen am Untergrund mit iCleaner-Reinigungstuch gereinigt.
 - ☐ Kleber gemäß Anleitung gemischt.
 - ☐ Kleber gleichmäßig auf die Montageflächen in der Klebevorrichtung aufgebracht.
 - ☐ Kleber gleichmäßig auf die Griffstangenträger aufgebracht.
 - ☐ Griffstangenträger unten leicht schräg angesetzt, danach vollflächig fest angedrückt.
 - ☐ Griffstangenträger unten 90° rechts links gedreht, damit sich der Kleber gut verteilt.
 - ☐ Alle Schritte für den zweiten Griffstangenträger identisch durchgeführt.
 - ☐ Uhrzeit der Montage notiert: _____ Uhr
-

7. Nach der Aushärtung

- ☐ Nach **24 Stunden** Klebevorrichtung und überschüssige Klebereste entfernt.
 - ☐ Griffstange in die Kugelringe eingeschoben.
 - ☐ Griffstange so gedreht, dass das max. Benutzergewicht vom Benutzer oben auf der Griffstange ersichtlich ist.
 - ☐ Griffstange mit den Gewindestiften in den Kugelringen gesichert.
 - ☐ Festigkeit des Haltegriffs durch Belastung geprüft.
-

Ort / Datum: _____

Name / Unterschrift: _____

⚠ Abschließender Sicherheitshinweis:

Ist ein Punkt nicht erfüllt, darf der Haltegriff weder montiert noch benutzt werden.

→ Unfall- und Verletzungsgefahr!

Eine Marke der



ROTH® GmbH
Kohlbergstraße 5
D-72213 Altensteig
(+49) 07453/9381-0
info@roth.gmbh
www.glubeli.de

